

NEC-01

Llamada extensión enfermera con botón de presión



Botón de llamada paciente para quitar alerta.

Nota: Este 1/4" jack esta siempre en el lado del modelo BTX-02, está diseñado para conectar la llamada enfermera-paciente, creando así un sistema inalámbrico de llamada de enfermera. Este dispositivo no es usado para conectarse al monitor de la cama.

Si una llamada de la extensión del paciente se utiliza con el BTX-02 y posteriormente sea desconecta accidentalmente, quizá por el paciente u otra persona no autorizada, el BTX-02 el sistema se activara rápidamente con el LED y la alarma y se transmitirá una alarma "Cabecera de la cama removida" al monitor central, o otro dispositivo de visualización.

Esta alarma se puede restablecer / cancelar pulsando el BTX-02 "RESET". Tenga en cuenta que está alarma no volverá a ocurrir, a menos que la extensión haya sido conectada y luego removida una vez más.